
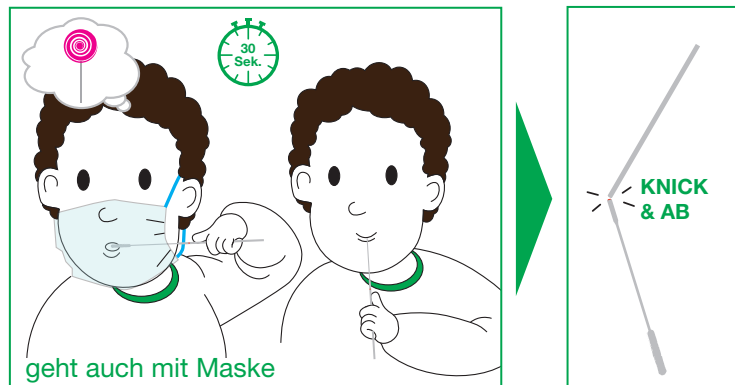


ANLEITUNG POOLTEST

Lieferumfang Testmaterial:


mehrere Lagen einzeln steril verpackte Lolli-Tupfer
Pool-Behälter, 50 ml
Etiketten auf DIN A4-Bögen

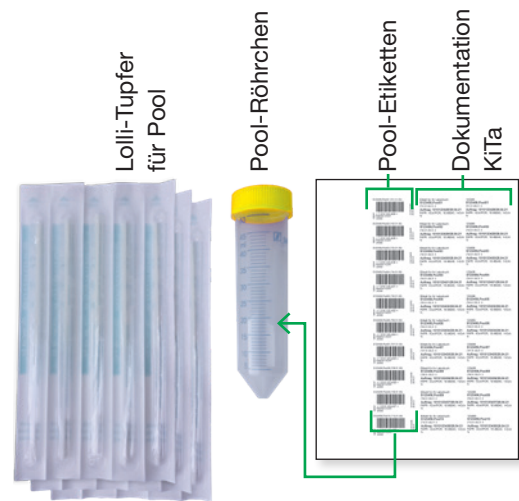

PROBENNAHME

1. Die Probenahme findet morgens in der KiTa statt.
2. Das bzw. die Pool-Röhrchen werden mit einem Pooletikett beklebt.
3. Die Tupfer der Kinder einer Gruppe werden in einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt – wenn das Röhrchen voll ist (max. 25 Tupfer), auch in einem weiteren.
4. Ein Transportdienst bringt die Proben in unser Labor.
5. Das Geburtsdatum für den SMS-Befunddownload lautet für die Pool-Ergebnisse: 31.12.1990.

Achtung! Die Kontaktdaten der Corona-beauftragten Person sind in dem Etikett hinterlegt, daher sollten bei einer Lieferung neuer Etiketten nicht mehr die alten verwendet werden.

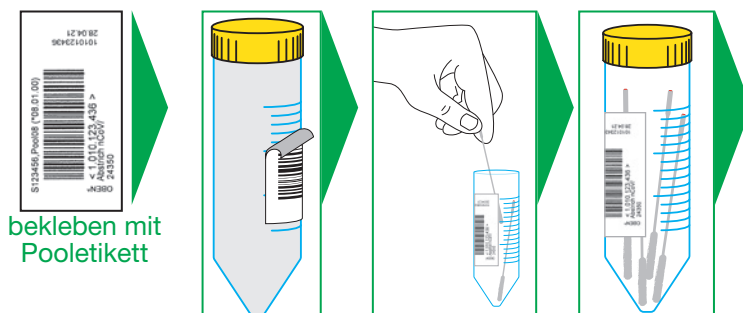

Proben ins Sekretariat/ zum Sammelpunkt

